

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材 (70904000)

## プロキシット F

---

### \*【形状・構造及び原理等】

下記の種類のペースト55mLがそれぞれチューブに入っている。

RDA7 ピンク(低研磨性/細/ファイン)

RDA36 グリーン(中研磨性/中/ミディアム)

RDA83 ブルー(高研磨性/粗/コース)

フリー RDA36(中研磨性/中/ミディアム)フッ素フリー

[成分]

キシリトール、グリセリン、フッ化物(フリー以外)、その他

### 【使用目的又は効果】

ペースト状の研磨材で、予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨し、歯面の清掃及び研磨に用いる。

### 【使用方法等】

本品を歯磨カップ等、適切な研磨器上にチューブから押し出し、歯面を研磨する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて、直接本品に触れないようにすること。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.com

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン侯国)