

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(70907000)

オプトラグロス

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、下記の形状で構成される。



(1)フレイム(Flame)

(2)カップ(Cup)

(3)ディスク(Disk)

(4)スパイラルホイール HP(Spiral Wheel)

(1)～(3)の3種類の形状には、それぞれPP(粗研磨:深青)とHP(研磨:薄青)がある。

【原理】

シャフト部分をハンドピースに接続し、歯科充填物または補綴物を研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1.使用前に134℃オートクレーブで5分間滅菌し、10分間乾燥する。
- 2.修復物の形状にあわせた適切な形状の本品を選択する。
 - ー セラミックスを研磨する場合はプレポリッシャー(PP:深青)で修復物表面を滑らかにし、続いてハイポリッシャー(HP:薄青)で最終研磨をする。
 - ー コンポジットレジン研磨する場合はハイポリッシャー(HP:薄青)で光沢を出す。
- 3.ハンドピースにシャフト部分を挿入し、きちんと接続したことを確認する。
- 4.中程度の圧で、50ml/分以上の注水下、セラミックスの場合は最大15,000rpm、コンポジットレジンの場合は最大10,000rpmで歯科修復物を研磨する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋を用いて、直接本品に触れないようにすること。
- ・本品の使用時、術者は保護メガネおよびマスクを着用し、粉塵を吸い込まないように注意すること。
- ・注水下で使用する。

【使用上の注意】

[使用注意]

本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

[重要な基本的注意]

- ・損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染、錆)等のあるものは、使用しないこと。
- ・曲げ、切削等の形態変更(改造)は破損等の原因となるので行わないこと。
- ・本品は記載の回転数で使用し、本品が過熱しないように注意すること。
- ・研磨ペーストは使用しないこと。
- ・ケミクレーブやディスインフェクターで滅菌をしないこと。
- ・セラミックスの場合は15,000rpm、コンポジットレジンの場合は10,000rpmを超えて使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent 株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン侯国)