

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 (70904000)

1回パックおよびテストパックは再利用禁止

プロキシット

** **【禁忌・禁止】**
1回パックおよびテストパック は再利用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- ** [形状] ペースト(80g)
プロキシット ピンク Fine 1回パック
プロキシット ブルー Coarse 1回パック
プロキシット テストパック
- [種類] ピンク(低研磨性/細/ファイン)
グリーン(中研磨性/中/ミディアム)
ブルー(高研磨性/粗/コース)
F フリー グリーン(中研磨性/中/ミディアム)
- [原理] ペースト状の研磨材で、ブラシ、歯磨
カップ等を用いて歯面を研磨する。
- [成分] キシリトール、ミント等

【使用目的又は効果】

ペースト状の研磨材で、予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用
いて歯面を研磨し、歯面の清掃及び研磨に用いる。

*【使用方法等】

1. 適量の本品を歯磨カップ等、適切な研磨器に塗布する。
 2. ハンドピースで歯面全体を丁寧に研磨する。
 3. 研磨後、口をすすぐ。
- [使用方法に関連する使用上の注意]
- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、
手袋等を用いて、直接本品に触れないようにすること。
 - ・ブルー/コースで研磨した後は、ピンク/ファインで必ず再
研磨すること。

【使用上の注意】

- [重要な基本的注意]
- ・本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした
患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせ
ること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- [貯蔵・保管方法]
- ・直射日光の当たらない場所に保管すること。
 - ・外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管する
こと。
 - ・製品に記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.com

[製造業者]

Ivoclar Vivadent AG(リヒテンシュタイン候国)