

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス (16189000)

プロアート CAD Wax blue

【形状・構造及び原理等】

〔形状、種類〕

直径98.5mm、厚さ12、20mmの青色の円形ディスク

〔原理〕

本品を切削加工し、合金用のモデリングワックスを製作する。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製用のキャスティングワックス

【使用方法等】

1. CAD/CAM機器で本品を切削加工する。
2. ディスクから完成した製作物を適切なクロスカットタングステンカーバイドバーで切り離す。形状の修正や仕上げはクロスカットタングステンカーバイドバーで行う。
3. 使用する合金の使用方法に従い、スプルーを付与する。
4. キャスティングリングの内側にセラミックライナーで線を引く。
5. 埋没材の使用方法に従い、埋没材を混和し、真空下で埋没する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・ 本品を切削する際は、換気を十分に行い、防塵マスクを着用し、削りかすを吸い込まないようにすること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・ 患者の口腔内に適用しないこと。
- ・ インベストメントリングがクラックを発生させる恐れがあるので、プレステクニックには使用しないこと。
- ・ 適合するCAD/CAM機器で切削すること。
- ・ 適切なミリングツールで切削しないと、過熱する恐れがあるので、CAD/CAM切削システムの推奨するミリングツールを用いること。
- ・ 作業中の温度は35℃を超えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.com

〔製造元〕

Ivoclar Vivadent AG(リヒテンシュタイン候国)