

機械器具 36 医療用ピンセット

一般医療機器 ピンセット 35079001

EMIアドソン鑷子

【警告】

1. 本製品は、未滅菌品です。使用前に必ず洗浄し、適切に滅菌してください。滅菌しないまま使用しないでください。(感染する恐れがあります。)
2. 本製品の取り扱いにあたり、この添付文章と取り扱い説明書を事前に十分理解すること。また先端については細心の注意をはらってください。【不明の場合は販売元に御連絡下さい】

【禁忌・禁止】

1. 本製品の使用目的と異なる用途で使用しないで下さい。《使用対象若しくは本製品に不具合を生じる恐れがあります。》
2. 本製品の加工や改造は行わないで下さい。《使用対象若しくは本製品に不具合が生じる恐れがあります。》

【形状・構造及び原理等】

形状:



原材料:

ステンレス鋼

原理:

1. 開いた2杯の刃(先端部)を閉じることによって物体を挟み保持する。

【使用目的又は効果】

診療又は手術の際に皮膚や組織、異物等をつかみ、又は把持するために用いる。

【使用方法等】

1. 本製品を使用する前に、本製品を滅菌器で適切に滅菌する。殺菌方法は、ユーザー手持ちの滅菌器の取扱説明書に従う。132℃/10分の高圧蒸気滅菌を推奨する。
2. 本品のハンドル部を握り操作することにより先端部が開閉し、診療又は手術の際に皮膚や組織・異物等をつかみ、又は把持する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ①クロイツフェルト・ヤコブ病患者、その疑いのある患者、もしくは同病起因による異常の可能性のある患者に使用する際は、製品再使用に関する国の通知等を遵守して下さい。

【主要文献及び文献請求先の項をご参照下さい。】

- ②本製品は、医療関係者以外は使用しないで下さい。
- ③本製品に破損等の異常が認められる場合は、使用しないで下さい。

2. その他の注意

- ①使用後は感染防止に注意して適切に処理、清掃のうえ保管してください。
- ②廃棄の際は、法律・条例等に従い、医療産業廃棄物として医療産業廃棄物処理業者に廃棄を委託してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温高湿を避け、塵埃が無く、水にぬれず、直射日光の当たらない清潔な場所に保管してください。

滅菌した状態で保管する場合は、滅菌有効期間を使用者の責任において管理して下さい。

【保守・点検に係る事項】

本製品の使用・保守の管理責任者は使用者側にあります。取り扱い説明書を参照し適切に保守管理を行って下さい。

1. 洗浄・滅菌

- ①付着した血液、体液、組織、薬品等は、直ちに洗浄し消毒してください。
- ②洗浄、滅菌する際は、必ず事前に本製品への付着物を除去しておいて下さい。
- ③洗浄、滅菌の際に用いる水は、精製水又は蒸留水を使用して下さい。
- ④洗浄、滅菌の際は、把持部を開いた状態で行って下さい。
- ⑤汚染除去に用いる洗剤は、中性洗剤を使用し、その適切な使用方法と使用濃度を守ってください。
酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けてください。
- ⑥磨き粉や金属ウール等で表面を磨かないで下さい。
- ⑦超音波洗浄装置等の洗浄装置を使用する際はメーカー指定の適切な洗剤を用いて下さい。家庭用洗剤等は使用しないで下さい。

2. 点検

本製品を安全に、より長い間ご使用いただくために、使用前、滅菌前等に適宜、汚れ、破損、変形、可動部の動き等を点検してください。

【包装】

1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 EMI ファクトリー
製造業者 : 株式会社 EMI ファクトリー