

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿セット 11155020

ビヨンダム

【禁忌・禁止】

1. 本品または本品の成分に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 付属品のチップは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

形状：不透明な青色のペースト

組成：二酸化ケイ素、TMPTMA、ウレタンアクリレート、その他

容器：1.5ml入りシリンジ (5本組み)

付属品：ミニチップ



(2) 原理

シリンジの先端に塗布用チップを取り付け必要量を塗布する。光照射するとペースト成分のモノマーが重合反応して硬化する。硬化部の隔壁により処置部への唾液等の侵入を防ぎ、歯肉を覆うことで歯肉を保護する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯肉保護隔離材および塗布用チップから構成され歯科治療の際に唾液による汚染防止、防湿及び歯肉保護などに用いる。

【操作方法または使用方法等】

本品を必要量取り出し、対象個所に塗布し、光重合用ライトで照射して硬化させる。

【使用上の注意】

- ・本品は決められた使用目的にのみ使用する。
- ・本品を抽出する時はゆっくりと一定の圧力で行う。出ない場合はチップを交換する。
- ・使用後はすぐに蓋を締め、常温にて保管する。
- ・皮膚に接触した場合、炎症などが起こることがあるのですぐに使用を中止する。
- ・本品が目に入らないように注意する。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受ける。
- ・本品を熱や光にさらさないようにする。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・保管方法
高温や直射日光を避け、常温にて保存する。
- ・使用期限
容器に記載

【包装】

1箱あたり5本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 インサイシブジャパン株式会社
製 造 業 142-0063
東京都品川区荏原 1-18-11
TEL 03-6715-6133
FAX 03-6715-6137

製 造 元 Beyond International Inc.
ビヨンド インターナショナル インク
(USA)

販 売 業 者 株式会社 J B A
142-0063
東京都品川区荏原 1-18-11
TEL 03-5755-5505
FAX 03-5755-5545