

機械器具 50 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 歯科用開口器 70949000

## ビヨンド開口器プロ

### 【禁忌・禁止】

・損傷、割れ、ひび、まがり等が見られた場合には、  
本品の使用を中止してください。

### 【形状、構造及び原理等】

#### （1）外観



### 【構成・材料】

1個入り（サイズ：MまたはL）

熱可塑性ゴム

### 【性能、使用目的、効能又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持することに使用する。

### 【操作方法または使用方法等】

- （1）三角形のマークが下唇側にくるよう本体を保持します。
- （2）本体を軽く押しつまむようにしながら、患者の口の片側から本体を挿入します。
- （3）本体がしっかりと固定されていることを確認したら、反対側も同じように挿入します。
- （4）口唇が本体で覆われていることを確認してください。
- （5）患者に口腔内側の舌ガードを軽く噛んでもらい、フィットするよう調整します。
- （6）処置が終了したら本体を軽く押しつまむようにし、患者の口から取り除きます。



### 【使用後について】

本品使用後は速やかに歯科用洗浄剤を用いて、血液、体液等を洗浄して下さい。洗浄後は十分な量の流水で洗浄剤を洗い流し、乾燥させてください。その後、破損や傷、汚れがないことを確認してください。

高温での滅菌を行うと、変質や変形する恐れがあるので十分に注意して下さい。

### 【使用上の注意】

本品を所定の目的以外で使用しないでください。  
また、本品を無理な力や角度で口腔内に装着・脱着しないでください。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温や直射日光を避け、常温常湿の清潔な場所に保管してください。

### 【包装】

- ・1袋あたり1個入、サイズMまたはL
- ・1箱あたり5個入、サイズMまたはL

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 インサイプジャパン株式会社  
製造業者 142-0063  
東京都品川区荏原 1-18-11  
TEL：03-6715-6133 FAX：03-6715-6137

製造元 Beyond International Inc.(U.S.A.)  
ビヨンド インターナショナル  
インク（米国）

販売業者 株式会社JBA  
142-0063  
東京都品川区荏原 1-18-11  
TEL：03-5755-5505 FAX：03-5755-5545