

歯科材料（08） 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう（70897020）

ロックヒデ

【形状、構造及び原理等】

主成分：石こう、その他
形状：粉末状

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イグエル株式会社
電話番号：0598-31-2412

【使用目的又は効果】

本品は歯科技工物を製作するために使用する

製造業者：KOREA GYPSUM CO.,LTD
製造先国名：韓国

【使用方法等】

- （1）混水量は、本品粉末100gに対して水20mLです。
- （2）練和時間は30～60秒間むらなく均一に練和して下さい。
- （3）印象に注入の際、パイプレーターを用いますと気泡の少ない美しい模型が得られます。
- （4）注入後40～60分で模型を取り出せます。

標準混水量（粉100gに対して）	20mL
硬化時間	10分
硬化膨張	0.09%
圧縮強さ	52MPa

【使用上の注意】

1. 使用上の注意

- （1）本品を扱う際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵の吸入しないこと。
- （2）本品の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどの防具を使用すること。
- （3）本品は、【使用目的】の用途以外には使用しないこと。
- （4）本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品が目に入らないようように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- （1）本品は、高温、多湿を避けて、保管すること。
- （2）開封後は密閉して保管すること。
- （3）本品は、歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

2. 有効期限

- （1）記載されているロット番号は製造日を示す。
使用期限は製造日より1年とする。
（例 Y Y M M D D は、20YY年MM月DD日）

【包装】

20kg 袋入り
18kg 箱入り（3kg シンプルパック ×6）
18kg 箱入り（1.5kg シンプルパック ×12）
3kg シンプルパック
1.5kg シンプルパック