

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 頭皮脳波用電極 11440001

ディスプレイザブル脳波用皿電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本製品は再使用をしないで下さい

【形状・構造及び原理等】

1. 構成と寸法

名称	コード	電極	直径	ケーブル長
ディスプレイザブルカップ電極	DAGD102600	Ag/AgCl	10mm	100cm
	DAGD152600			150cm
	DAGD252600			250cm
ディスプレイザブルカップ電極 用電極	DAGD0000	Ag/AgCl	10mm	-
ディスプレイザブルカップ電極 用ケーブル	DECS102600	-	-	100cm
	DECS152600			150cm
	DECS252600			250cm
MRI対応ディスプレイザブル カップ電極	DAGR102600MRI	Ag/AgCl	10mm	100cm
	DAGR152600MRI			150cm
	DAGR252600MRI			250cm

2. 外観図

コード	外観
DAGD102600	
DAGD152600	
DAGD252600	
DAGD0000	
DECS102600	
DECS152600	
DECS252600	
DAGR102600MRI	
DAGR152600MRI	
DAGR252600MRI	

本製品では、以下のようなシンボルマークが使用されています。
シンボルマークの示す意味は下表のとおりです。

	医療機器の2007/47/EECまでの改正を含む医療機器指令 93/42/EECに準拠しています。
	カタログ番号
	製造番号
	使用の恒続・指示

	製造者
	再使用禁止
	ラテックス不使用
	非滅菌

3. 動作原理

皮膚表面に貼り付け、体表の生理電気活動をケーブルを介して電気診断機器または神経測定機器へ伝達します。

4. 仕様

ケーブルの色：黒、桃、橙、茶、青、黄、緑、白、灰、赤
コネクタ：Touch Proof 1.5mm DIN 42802

【使用方法】

1. 使用目的

電気生理活動の記録や電気刺激を目的とした、電気診断機器または神経測定機器と併せて使用されます。

2. 使用方法

- (1) 研磨クリーム使用して、電極を適用する領域の患者の皮膚を脱脂し、その部分を乾燥させます。
- (2) 導電性ペーストなどを使用して、皮膚に電極を貼り付けます。
- (3) 導電性ゲルを使用する場合、鈍い針の付いたシリンジに入れ、電極の穴に針を挿入し、電極カップにゲルを注入し、丸い動きで皮膚をわずかに擦ります。
- (4) 電極を刺激や記録のための検査機器に接続します。
- (5) 電極と皮膚のインピーダンスが高すぎないことを確認します。一部の電極インピーダンスが高い場合、(3)で説明されていることを繰り返します。

3. 使用上の注意

- (1) 使用した後に以下の方法で電極を掃除して下さい。
- (2) 使用後、複合汚染を避けるために電極は廃棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈外国製造業者〉

Spes Medica S.r.l.,
Via Europa Zona Industriale, 84091 Battipaglia (Sa), Italy
TEL : +39 0828 614191
FAX : + 39 0828 341788

〈製造販売業者〉

イーストメディック株式会社
〒920-0062 石川県金沢市割出町 702 番 2
TEL : 076-239-4761
FAX : 076-239-1771