

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

スナップ心電用電極ケーブル

【禁忌・禁止】

- 併用医療機器[相互作用の頁参照]
(1)磁気共鳴画像診断装置(MRI 装置)

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- スナップ心電用電極ケーブル

2. 外観

-



3. 動作原理

体表面に設置した電極と心電計とを接続し、体表面の心電信号を装置に伝達する導体です

【使用目的または効果】

本製品は体表面に設置した電極と接続し、体表の電気信号を心電計に伝達する導体です。

【使用方法】

1. 使用方法

- 電極とこのケーブルを接続します。
- ケーブルのコネクタを測定機器に接続します。
- アルコール綿等で患者の装着部の皮膚をきれいにします。
- 電極を患者に装着・貼り付けます。
- 測定機器にて電波状態を確認してください。

【使用上の注意】

1. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

- 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI)	使用禁止	MRI 装置への吸着、故障、破損、やけどなどが起こる可能性があります。

【保守・点検に係わる事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 使用後は、湿らせた布と中性洗剤で拭いてください。
- 洗浄液に浸さないでください。
- 自動クリーニングツールは使用しないでください。
- 非侵襲性医療製品の表面消毒に使用される製品で拭き消毒を行ってください。
- 廃棄する際は医療機器に適用される規制に従って処分してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈外国製造業者〉

Spes Medica S.r.l.,

Via Europa Zona Industriale, 84091 Battipaglia (Sa), Italy

TEL : +39 0828 614191

FAX : + 39 0828 341788

〈製造販売業者〉

イーストメディック株式会社

〒920-0062 石川県金沢市割出町 702 番 2

TEL : 076-239-4761

FAX : 076-239-1771

