

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000

ディスプレイ心電用電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. シングルユースの付属品については再使用を禁ずる。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- (1) ディスポーザブル心電用電極

2. 外観

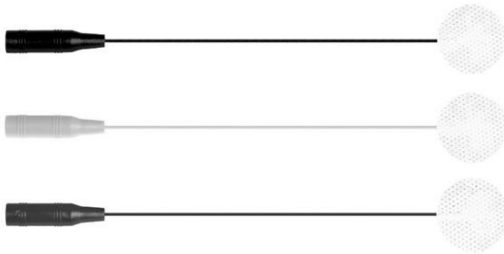

3. 動作原理

皮膚表面に貼り付け、体表面の心電信号を心電計などの測定機器に伝達します。

4. 仕様

ケーブルの色：黒、赤、緑、白

コネクタ：Touch Proof 1.5mm, 4mm socket

【使用目的または効果】

心電図の記録を目的として、体表の電気信号を心電計などの測定機器と併せて使用します。

【使用方法】

1. 使用方法

- (1) 皮膚のインピーダンスを減少させるため、皮膚前処理剤を用いて測定地点を磨いて準備しておきます。
- (2) 患者の皮膚を湿った脱脂綿で清潔にします。
- (3) 電極から透明な裏張りを取り除き、準備した地点に電極を設置します。
- (4) 電極の中央部分において十分な接着圧を確保し、端へと動かします。
- (5) 検査の終了時は、電極を剥がして取り除きます。

3. 使用上の注意

- (1) 電極は非滅菌です。単一の患者でのみ使用してください。
- (2) 使用の際は、ケーブルを引っ張らないでください。
- (3) 残ったゲルは湿った脱脂綿で取り除いてください。
- (4) 使用後、複合汚染を避けるために電極は廃棄してください。

【保管方法及び使用期限】

保管条件：温度 10℃～30℃

有効期間：2 年間

【保守点検に係る事項】

・処分

病院から出るごみは有効な法規に従って処分されなければなりません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈外国製造業者〉

Spes Medica S.r.l.,

Via Europa Zona Industriale, 84091 Battipaglia (Sa), Italy

TEL : +39 0828 614191

FAX : + 39 0828 341788

〈製造販売業者〉

イーストメディック株式会社

〒920-0062 石川県金沢市割出町 702 番 2

TEL : 076-239-4761

FAX : 076-239-1771