



2021年7月作成（新様式第1版）

医療機器届出番号：27B1X00132000003

医療用品（04） 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏（JMDNコード：34864000）

販売名：スープラソーフ F

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象>

以下を呈する患者には使用しないこと。

1) 原材料に対する過敏症

<使用方法>

- 1) 再使用しないこと。[巨視的損傷を認めない際においても、本品の機能損傷や使用時の破損に至る恐れがある。]
- 2) 再滅菌しないこと。[本品は、滅菌包装より取り出した後に、直ちに使用することを意図した製品であるため、繰り返し滅菌に対する安全性は担保されていない。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

製品名、サイズ、製品番号、ロット番号等については、法定表示ラベルの記載を確認すること。

1) Suprasorb F

		外観写真
原材料	- ポリウレタン - ポリアクリレート	
サイズ	枠外を参照	

- 5cm×7cm/10枚入（製品番号：20460）
- 5cm×7cm/100枚入（製品番号：20461）
- 10cm×12cm/10枚入（製品番号：20462）
- 10cm×12cm/50枚入（製品番号：20463）
- 10cm×25cm/10枚入（製品番号：20464）
- 15cm×20cm/10枚入（製品番号：20465）
- 20cm×30cm/10枚入（製品番号：20466）

2. 原理

貼付することにより創傷保護/カテーテル固定に使用する。

【使用目的又は効果】

創傷保護/カテーテル固定

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 適切なサイズを選択する。
- 2) 貼付前に清拭する。
- 3) 包装より取り出し、中央から台紙を剥がし、透明フィルムの粘着面を出す。
- 4) シワや隙間が出来ないように、注意して粘着面側を皮膚に貼付する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) サポートフィルムを剥がすと皮膚には透明フィルムのみ残る。
- 2) 製品番号：20464、20465、2046は、台紙が赤色波型となっており、サポートフィルムと一体化されていない。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装の破損や製品の以上が認められた場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光を避け、水漏れに注意の上、室内で保管

有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

伊藤メデックス株式会社
緊急連絡先：042-274-0711（代表）

<製造業者（設計）>

ローマン アンド ラシアー社（Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG.）、ドイツ