

類別：器 01 手術台及び治療台
一般的名称：手術台アクセサリ（JMDN コード：70469000）
販売名：固定用フック

【禁忌・禁止】

- ・本品を二次加工（改造）することは、破損等の原因となるので、絶対に行わないこと。
- ・腐食が生じ、孔食や摩耗の発生原因になる為、ステンレス製品の手術器具を長時間血液や生理食塩水にさらさないこと。
- ・使用前に、きず、割れ、錆、ひび割れ、接着不良などの不具合がないか外観検査を実施し、不具合が認められる場合には使用しないこと。
- ・器具の損傷や破壊を招くことがある為、本品を使用目的以外に使用しないこと。
- ・未滅菌での使用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】**1. 形状・構造**

(1)アタッチメント ツインフック ロング



(2)アタッチメント ツインフック ショート



(3)アタッチメント トリプルフック



原材料：ステンレス鋼（ステンレス鋼には、クロム及びニッケルが含まれている。）

2. 原理

本品を用いて、他の装置との接続を可能にする。

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリである。

【操作方法又は、使用方法等】

1. 本品は使用前に必ず点検、洗浄及び滅菌を行うこと。
2. 本品は手術台に固定された他の接続可能な機器などを接続する。
3. 使用後は、点検、洗浄を行うこと。

【使用上の注意】**1. 使用前**

- (1) 本品は使用前に必ず滅菌をすること。
- (2) 新品を使用する際は洗浄を行ってから滅菌をすること。
- (3) 損傷、摩耗、又は機能していない部位がないかを必ず確認すること。
- (4) 併用して使用する手術機器がある場合は、事前に組合せ、異常なく使用できることを確認する。

2. 使用中

保持可能な重要を超えないこと。（破損する）

3. 使用後

- (1) 使用後は出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚染物及び薬品等除去し、感染防止のため洗浄、消毒すること。
- (2) 損傷、変形等がある器械は、識別した上で再使用されないように管理すること。
- (3) 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は摘出等適切な処置を施すこと。
- (4) 摩耗粉が生じた場合は、速やかに洗浄し、除去すること。
- (5) 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合は、破棄処分すること。

4. 化学薬品、溶液に対する注意

- (1) 溶液（生理食塩水、次亜塩素酸ナトリウム、ヨードを含有した消毒剤など）には本品の原材料であるステンレススチールに腐食や孔食を起こし易いものがある為、長時間の接触を避ける。接触後は迅速に洗い流すなど注意すること。
- (2) 漂白剤や水銀の重塩化物などの強酸（pH4 以下）又はアルカリ製剤（pH10 以上）を消毒に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

- (1) 水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管すること。
- (2) ステンレススチールとアルミニウムのように異種金属の手術機器は、原則として別にセットすること。これは、長期保管の際に異種金属同士の電解沈着を防止する為である。

【保守、点検に係る事項】

適切な洗浄および標準的な日常のメンテナンスを実施すること。これらを適切に実施しない場合は、機器の機能低下の要因となる。

1. 洗浄方法

(1) 予備洗浄

おおまかな汚染物質を除去し、十分にすすぐこと。生理食塩水や塩素系溶液は使用しないこと。

(2) 手作業による洗浄

① 器械を洗浄液に完全に浸漬すること。

② 手作業による洗浄には、酵素が配合された洗浄剤や、蛋白質凝固変性作用のない洗浄剤を使用すること。洗浄剤の濃度、温度、時間及び再利用の可否に関しては、洗浄剤の取扱説明書に従うこと。

③ 落ちにくい汚れは洗浄液の中で柔らかいブラシ等を用いて洗浄すること。

(3) 超音波洗浄及びウォッシャーディスインフェクター

① ウォッシャーディスインフェクターを用いる場合は、洗浄機の取扱説明書に従い、洗浄剤を使用すること。消毒及び洗浄を適切に行うためには、水質によって洗浄剤の種類と濃度を調整する必要がある。

② ウォッシャーディスインフェクターを用いる場合は、洗浄機の取扱説明書に従い、洗浄用バスケットに器械を詰め過ぎないように配置し、陰を作らないようにすること。

(4) すすぎ

すすぎには完全脱イオン水（RO水）をしようすること。市水（一般の水道水）に含まれる残留塩素や有機物質が器械表面のしみや錆発生の原因となる。

(5) 乾燥

洗浄後の器械は直ちに乾燥させ、湿った状態で放置しないこと。

【包装】

個包装 未滅菌 1 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：

伊藤メデックス株式会社 大阪営業所

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東四丁目 2-32

大真ビル 501

TEL：06-6736-5261

FAX：06-6736-5261

製造業者：有限会社 大響機工