


ソフト耳鏡 Ear Fit

【形状・構造及び原理等】

＜構造図＞

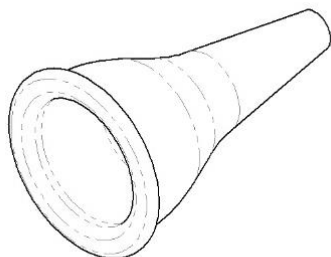

＜材質＞

スチレン系熱可塑性エラストマー

【使用目的又は効果】

- ・本品は、外耳道を拡張し、外耳道内または鼓膜の観察や診断、診療手術を補助する器具である。

【使用方法等】

- * 1. 本品を包装内より取り出し、洗浄を行った後、消毒もしくは滅菌を行う。
- * 2. 使用者は根元部を持ち、先端部を患者の耳孔に挿入する。
- * 3. 適度な深さで挿入を止め、観察や診断、診療手術を行う。
- * 4. 使用後の耳鏡は次の使用に備え、すみやかに洗浄し、消毒もしくは滅菌を行った後、適切に保管する。



【使用上の注意】

- ・本品使用の際は、製品の添付文書を必ず読み、その指示を熟知し使用すること。
- * ・本品は未滅菌品につき開封後には洗浄を行い、消毒もしくは滅菌を行うこと。
- * ・使用後は、次の使用に備え速やかに洗浄し、消毒もしくは滅菌を行うこと。

＜重要な基本的注意＞

- ・包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常が見られるものは使用しないこと。
- ・本品を廃棄する場合は、法規制に従って廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意すること。
- ・高温、高湿や、直射日光の当たる場所は避け、埃などに配慮し、清潔な環境下で保管すること。

＜有効期限＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。
- （自己認証により設定）

【保守・点検に係る事項】

- ・本品は、消耗品（修理不可能）であるため、変形など使用前点検の結果に応じて、新品と交換すること。

* 1. 洗浄

- ① 酵素洗浄液への浸漬。浸漬時間、濃度などは酵素洗浄液の取扱説明書を確認し、使用方法を順守すること。
- ② 柔らかいブラシを使用し、汚れを取り除く。その際、金属製ブラシや研磨剤は使用しないこと。
- ③ 流水下で洗浄剤を完全にすすぎ落とし、ガーゼにて水分を十分に拭き取る。

* 2. 消毒

- ① フタラル製剤等の消毒薬で浸漬消毒を行う。その際、各消毒薬の添付文書に従って換気を行い、保護具を使用すること。
- ② 貯留水に入れ、流水下で消毒液を十分にすすぎ落とす。
- ③ 水気を取り乾燥させ、清潔な状態で保管する。

* 3. 滅菌

推奨滅菌方法

高圧蒸気滅菌

- ・プレバキューム式：134℃、10 分
- ・重力置換式：135℃、3 分
- ・変形の原因となるため、136℃以上での滅菌は行わないこと。
- ・変形の原因となるため、製品同士をきつく圧入したり、他の滅菌品を上から乗せるなど、本品への外力が掛かる状態での滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

イナバゴム株式会社 鳥取工場
〒680-0911 鳥取県鳥取市千代水1-63
TEL 0857-26-5592