

* 2019 年 9 月 12 日 (第 2 版)

2018 年 1 月 15 日 (第 1 版)

届出番号 : 24B2X10011000001

機械器具 15 舌圧子

一般医療機器 舌圧子 14066000

Lustromedic 舌圧子**再使用禁止****【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者

岩崎工業株式会社 三重プラント

TEL 0598-29-6797

*** 【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

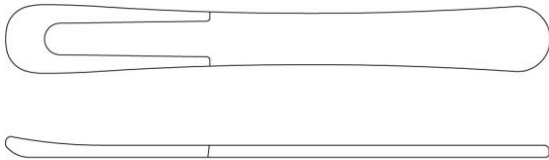

2. 原材料

- 1) 中板 : ポリプロピレン
- 2) 枠部 : 熱可塑性エラストマー

3. 原理

本品(舌圧子)で舌を圧定することで、口腔、咽頭の視野を確保する。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器および組織の検査を容易にするために用いる器具をいう。

【使用方法等】

- 1) 滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 2) 口腔内に舌圧子を入れ、舌を圧定する。

【使用上の注意】

- 1) 包装が破損、汚損しているものは使用しないこと。
- 2) 本品に破損がある場合は使用しないこと。
- 3) 開封後は速やかに使用すること。
- 4) 破損する可能性があるため、過度な力で押さえないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所及び火気を避けて常温で保管する。

2. 有効期間

滅菌有効期間 : 製造年月より 3 年