

検査・検診用メディカル手袋 CARE GRIP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・左右同一型（平手タイプ、両利き用）
- ・色：ブルー
- ・パウダーフリー
- ・未滅菌
- ・主原料：ニトリルゴムラテックス
- ・表面仕上げ：粗面

【使用目的または効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

1.使用注意

- ・体質により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施す。

2.重要な基本的注意

- ・使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。

3.相互作用

- ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認の上、使用する。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。

2.有効使用期限

- ・箱の底面に記載(自己認証(製造メーカーのデータ)による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

【製造販売元】

株式会社 INBYTE

東京都港区麻布台二丁目4番2号 保科ビル4F

TEL：03-6807-4126

【製造元】

国名 マレーシア

業者名 Hartalega Sdn. Bhd.