

医療用品(3)手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(70976000)

再使用禁止

## やわらかナース手袋

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、PVC(ポリ塩化ビニル)を主原料とする、滑剤(パウダー)

なしの検査・検診用使い捨て手袋である。

左右兼用、表面仕上げは平滑、未滅菌である。

### 【使用目的又は効果】

医療現場における検査・診察、処置補助など非侵襲性用途で  
用いる使い捨て手袋で、医療従事者等の衛生保持を目的とする。

### 【使用方法等】

手袋はパッケージから取り出し、装着して使用する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹  
等が発生することがあるので、異常を感じた場合 には、直ち  
に使用を中止すること。必要に応じて、医師に相談し適切な  
処理を行うこと。

#### 2. 重要な基本的注意

- 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くこ  
とがあるので注意すること。
- 製品に破損や汚損がある場合やピンホールなどの異常  
が認められる場合には使用しないこと。
- 薬品や溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場  
合があるので確認の上、使用すること。
- 複数の患者には使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し、適切に処分すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管  
する。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、  
エックス線機器等に近づけないこと。
- 有効期限：包装材に記載のとおり

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社 iiもの本舗

群馬県佐波郡玉村町藤川184-4

TEL:0270-64-1011

[製造業者]

Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.

国名：中華人民共和国