

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

プレンスワブネーザル


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

本品は検体採取から培養までが短時間の場合に用いる滅菌綿棒である。

本品は検査材料の採取ならびに輸送を目的とし、キャップ付き綿棒がチューブに入っている。綿棒（スワブ）には品質が均等で pH の影響を受けない化学繊維が使用されている。チューブ側面のラベルには採取した検体についての情報が記入出来るようになっているほか、使用期限、製造番号が記載されている。病院内で病棟または外来診療棟から検査室への検体輸送時に使用する。

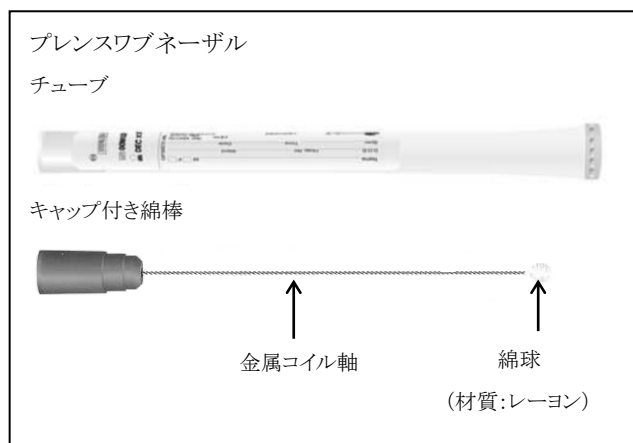


【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

【使用方法等】



1) 口栓を廻すようにして綿棒を取り出す。

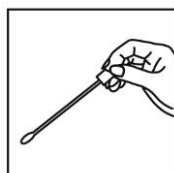

2) スワブで検体を採取する。



3) 綿棒を元のチューブに戻す。



4) ラベルに必要事項を記入する。

【使用上の注意】

- 検査材料の取扱には十分に注意すること。使用後のチューブ、綿棒はオートクレーブなどで滅菌処理してから廃棄すること。
- 使用前に汚染のないことを確かめてから使用すること。
- 誤って凍結させたものは使用しないこと。
- 検体採取後すみやかに検査すること。

【保管方法及び有効期間】

保管方法 : 5～25℃で保存(凍結しないこと)

使用期限 : 使用期限はラベルに記載

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

イワキ株式会社

<https://www.iwaki-kk.co.jp>

<問い合わせ先>

イワキ株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目 12 番 1 号

TEL 03-6733-0227 FAX 03-6733-0228

E-mail bio@iwaki-kk.co.jp

<製造業者>

Medical Wire&Equipment Company (Bath) Limited

メディカル ワイヤー アンド エクイップメント カンパニー

バス リミテッド (イギリス)