

一般医療機器 医04 整形用品
救急絆創膏 JMDNコード：34864000

販売名：巻くだけコットンばんそうこう

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び効果】

本品は、綿、ポリプロピレン、スパンデックスを使用した自己粘着性伸縮テープからなる救急絆創膏です。

【使用目的または効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等

【使用上の注意】

患部を清潔にしてから使用してください。
皮膚に水分やクリーム、汚れが残っていると剥がれやすくなり、密着性が損なわれますので、きれいに拭いてからご使用ください。
肌に異常がある時は、ご使用をお控えください。
小児が使用する場合は、保護者指導のもとにご使用ください。

使用后、剥がす時は患部や周りの皮膚を痛めないようご注意ください。ゆっくりと剥がしてください。

〔使用中または使用後の注意〕

本品の使用により、発疹・発赤・かぶれ・かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

【使用方法等】

傷口を消毒した後、テープの皮膚接触面に指が触れないようにテープを傷口にあて巻き付けるように皮膚を固定してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 直射日光を避け、高温多湿でない場所で保管してください。
- 2) 小児の手が届かない場所で保管してください。
- 3) ブリスターに入れた状態で保管してください。

2. 有効期間

製造後5年間。製品包装に記載（自己認証による）

【製造元】

SPITA Smart Products BV

【輸入先国】

オランダ

【製造販売業者】

株式会社 いっしん

〒651-0066 兵庫県神戸市中央区国香通1-2-2F

Tel : [078-251-811](tel:078-251-811) Fax : 078-330-3567