


類別及び一般的名称:機械器具(60) 歯科技工用高速レーズ
一般医療機器 (JMDNコード: 70740000)

販売名 : 高速レーズ SL-2000

【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。[誤った使用方法は本品の破損を招く恐れがあるため]
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わない事。[本来の特性が維持できなくなり、故障・破損の原因となるため]
3. 本製品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分に理解すること。

【形状・構造等】

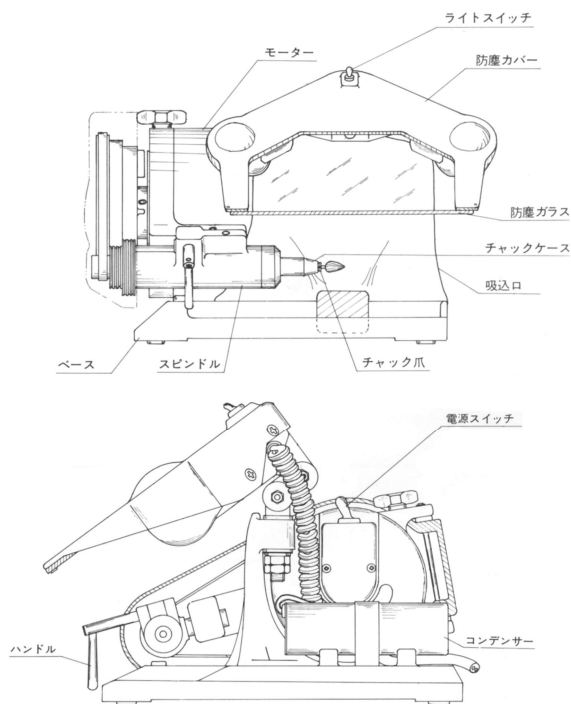

【性能・使用目的・効能又は効果】

1. 使用目的
技工切削、研磨作業
2. 性能
電源電圧 : AC100V
電源周波数 : 50/60Hz
電源入力 : 200W
回転速度 : 7,000・10,000・20,000rpm
3. 寸法及び重量
寸法 : 280(W)×300(D)×260(H)
重量 : 15.5Kg

【操作方法又は使用方法】

使用説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

1. バー、ポイント類は ISO2.35mm の規格品を使用すること。またそれらの指定する回転速度以下で使用すること。
2. バー、ポイント類の軸が曲がったり、錆びたり擦り減っているものは非常に危険です。絶対使用しないこと。

3. 本品の改造による使用は、安全、性能を損ないます。絶対しないこと。
4. 作業は身軽な服装で行うこと。袖口の開いたものや、手袋の着用、長い毛髪は巻き込まれる恐れがあり危険です。
5. ベルトの張りは指で軽く押さえて、約 10mm 位の"たるみ"が出来るように調整すること。
6. スピンドルに、ポイント、バー類をセットしていない状態での回転は絶対にやめること。モーターの焼損、スピンドルの故障の原因になります。
7. 研削物材質に合った回転数で使用する。
8. スピンドルに注油したり、水等を絶対にいれないこと。
9. 照明用電球は白熱球 100V、40W を使用すること。
10. バーの保持力が弱い(空回り)場合及びチャック内にバーを差し込み縮まった状態にして、チャックの溝幅がゼロに近いときはバーを交換すること。
11. 本機は記載の使用目的以外には使用しないこと。
12. 本機は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 使用後は切削粉を刷毛や乾いた布を使って取り除くこと。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意すること。
4. 水のかからない場所に保管すること。
5. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、次回の使用に備えて、異常な箇所がないことを確認すること。
2. いつも安全且つ快適に使用するために定期点検を行うこと。
3. 保守部品の保有期間は製造中止後 10 年とする。

【梱包】

セット	
本体	1
スピンドル	1
付属品	
ダクトホース	1
スペアーチャック	1
チャックレンチ	1
六角スパナ	1
吹込防止用アミ	1

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売業者 : 浦和工業株式会社
住 所 : 埼玉県久喜市河原井町 1 2
T E L : 0 4 8 0 - 2 4 - 1 7 5 1
F A X : 0 4 8 0 - 2 2 - 0 9 1 5

使用説明書を必ずご参照ください。