

器(02)医療用照明器

一般医療機器 汎用光源 JMDN 32037000

ウェルチ・アレン イルミネーター

**【形状・構造及び原理等】

**本品は、イルミネーターの先端から強い光を照射して患部を観察できるようにする機器です。

ヘッド部は以下に示す5種類のものがあります。

- (1) 3.5V イルミネーターヘッド
- (2) 3.5V 多用途イルミネーターヘッド
- (3) 3.5V 舌圧子ホルダーヘッド
- (4) 3.5V 咽頭ミラーヘッド
- (5) 3.5V 鼻咽喉ミラーヘッド

以下に形状、構造を示します。

(1) 3.5V イルミネーターヘッド



(2) 3.5V 多用途イルミネーターヘッド



(3) 3.5V 舌圧子ホルダーヘッド



(4) 3.5V 咽頭ミラーヘッド



(5) 3.5V 鼻咽喉ミラーヘッド



原理

ハンドルにある電球を発光して光ファイバーで先端まで導いて患部を照明して視野を明るくします。

**【使用目的又は効果】

**本品は、患部を照明することを目的とします。

【使用方法等】

1. ハンドルの点灯スイッチがオフ状態であることを確認してください。
2. ヘッドをハンドルの取り付け部に垂直に装着し回転させて固定します。
3. ハンドルのスイッチを押しながらノブを回転させライトを点灯使用します。

4. ハンドルのスイッチを逆方向に回転させると消灯します。

**【使用上の注意】

- ・充電式ハンドルに使用するACアダプター及びアクセサリは弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。
- ・本製品を高温・高湿又は腐食性ガスなどの環境で保管しないでください。
- ・ヘッドの光学系やプラスチック部が劣化する可能性があるため紫外線殺菌灯などの設置された場所に放置しないでください。
- ・使用中に何らかの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいはお取引のディーラー様または製造販売業者へ連絡してください。
- ・本品は滅菌などの措置はできません。故障の原因となります。
- ・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに使用を中止し乾燥した布などで十分拭き取ってください。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないでください。電気ショックを受ける危険性があります。
- ・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分及び周辺部が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないように注意してください。熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります。
- ・本製品の光源を見つめたり、連続して眼(眼球)を照明したりしないでください。眼の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります。
- ・瞳孔径や嫌悪反応が通常ではない場合は、眼を保護してください。

**【保管方法及び有効期間等】

常温で清潔な場所に保管してください。

**【保守・点検に係る事項】

洗浄・清掃方法

・本製品外側部分は、少量のぬるま湯やアルコールで湿らせた布などで拭くことができます。また拭いた後は、湿気を十分に取るか十分乾燥させた後に使用してください。過度に水分・アルコールを付けて拭くと、本体内部に水分・アルコールが侵入し故障の原因となります。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

**外国製造所(国名)

Welch Allyn Inc. (米国)

ウェルチ・アレン、インク