

機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

パテラレトラクター3

**【禁忌・禁止】

・本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 組成 ステンレス鋼
2. 形状・構造



【使用目的又は効果】

**本品は再使用可能な手術器械であり、人工膝関節置換術に用いる。パテラのレトラクトに使用する。

【使用方法等】

**1. 使用前

本品は使用前に滅菌すること。

一般的な滅菌方法は、【保守・点検に係る事項】の滅菌方法の項参照。

**2. 使用方法

レトラクターのリング部分をパテラに合わせて挿入し、レトラクトする。

**【使用上の注意】

**1. 重要な基本的注意

併用するインプラントや器械の添付文書を必ず読んでから使用すること。

2. 不具合・有害事象

- ・本品使用時の不具合・有害事象として、組織、靭帯、腱、神経、血管、骨等の損傷及び感染症が考えられる。
- ・整形外科用インプラント全般に次の不具合・有害事象が報告されている。また、手術による外科的侵襲などによっても次の不具合・有害事象の発生が考えられる。
- ・インプラントの破損、折損、ルースニング。
- ・インプラント磨耗粉による組織球形肉芽腫。
- ・金属アレルギー。
- ・周囲の神経障害。
- ・感染症。
- ・寛骨臼又は大腿骨への穿孔。
- ・血管系の合併症。
- ・転子部における問題。
- ・脱臼及び亜脱臼。
- ・筋肉と軟部組織の緩み。
- ・静脈血栓症。
- ・肺塞栓症。
- ・術中及び術後の骨折。

3. 高齢者への使用

高齢者は骨が粗鬆症化している場合が多く、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント後に緩み等が起きる可能性があるので慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

常温、常湿にて保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

**1. 保守点検

- ・本品使用前に、キズ、割れ、サビ、ひび割れ、汚れ等の不具合がないか、外観検査を実施すること。
- ・本品使用前に必ず滅菌を行うこと。
- ・本品使用後は、損傷がないかどうかを検査すること。
- ・本品使用後は、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行った後、血液等異物が付着していないことを確認し、滅菌を行い保管すること。

**2. 洗浄

- ・汚染除去に使用する洗剤は、必ず医療用洗剤等、当洗浄に適したものを使用すること。
- ・強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるため使用しないこと。
- ・洗浄及び滅菌に使用する水は蒸留水・脱イオン水を使用すること。
- ・洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジ等を使い、磨き粉、金属ブラシ等は使用しないこと。
- ・洗浄装置(超音波洗浄装置を含む)を使用する場合は、本品に鋭利な器械が接触して損傷しないよう注意すること。
- ・超音波洗浄装置を使用する場合は装置の取り扱い説明書に従って異物等がないことが確認できるまで洗浄すること。
- ・洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。

**3. 滅菌方法

本品は、医療機関内において 10-6 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

標準的滅菌条件: 高圧蒸気滅菌法

温度	時間
121℃	20分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

株式会社 ウミヒラ
電話番号: 075-932-4359

【製造業者】

株式会社 ウミヒラ

【販売業者の氏名又は名称等】

**ジンマー・バイオメット合同会社
電話番号 0463-30-4800(代)