

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

トライアルプレート 2300568

【禁忌・禁止】

- ・専用品以外への使用 [「相互作用」の項参照]
- ・本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 組成 ステンレス鋼
2. 形状・構造等

	品名 トライアル Y 型プレート ナロー 2 穴 カタログ番号 IJT-626982T
	品名 トライアル Y 型プレート ナロー 3 穴 カタログ番号 IJT-626983T
	品名 トライアル Y 型プレート ナロー 4 穴 カタログ番号 IJT-626984T
	品名 トライアル Y 型プレート ナロー 5 穴 カタログ番号 IJT-626985T
	品名 トライアル Y 型プレート ナロー 6 穴 カタログ番号 IJT-626986T
	品名 トライアル Y 型プレート ナロー 7 穴 カタログ番号 IJT-626987T

	品名 トライアル キューホイトプレート カタログ番号 IJT-626885T
	品名 トライアル ストレートプレート ナロー 2 穴 カタログ番号 IJT-626962T
	品名 トライアル ストレートプレート ナロー 3 穴 カタログ番号 IJT-626963T
	品名 トライアル ストレートプレート ナロー 4 穴 カタログ番号 IJT-626964T
	品名 トライアル ストレートプレート ナロー 5 穴 カタログ番号 IJT-626965T
	品名 トライアル ストレートプレート ナロー 6 穴 カタログ番号 IJT-626966T
	品名 トライアル ストレートプレート ナロー 7 穴 カタログ番号 IJT-626967T

	品名 トライアル テイラーネックプレート カタログ番号 IJT-626880T		品名 トライアル ナビキュラープレート 左用 カタログ番号 IJT-626881T
	品名 トライアル テイラナビキュラープレート ショート カタログ番号 IJT-626761T		品名 トライアル ミディアルコラムフュージョンプレート 右 ショート カタログ番号 IJT-626772T
	品名 トライアル テイラナビキュラープレート ロング カタログ番号 IJT-626762T		品名 トライアル ミディアルコラムフュージョンプレート 右 ロング カタログ番号 IJT-626774T
	品名 トライアル ナビキュラーキューニフォームプレート 右 ショート カタログ番号 IJT-626752T		品名 トライアル ミディアルコラムフュージョンプレート 左 ショート カタログ番号 IJT-626771T
	品名 トライアル ナビキュラーキューニフォームプレート 右 ロング カタログ番号 IJT-626754T		品名 トライアル ミディアルコラムフュージョンプレート 左 ロング カタログ番号 IJT-626773T
	品名 トライアル ナビキュラーキューニフォームプレート 左 ショート カタログ番号 IJT-626751T		品名 トライアル ラテラルコラムレングスニングプレート 0mm カタログ番号 IJT-626800T
	品名 トライアル ナビキュラーキューニフォームプレート 左 ロング カタログ番号 IJT-626753T		品名 トライアル ラテラルコラムレングスニングプレート 6mm カタログ番号 IJT-626806T
	品名 トライアル ナビキュラープレート 右用 カタログ番号 IJT-626882T		品名 トライアル ラテラルコラムレングスニングプレート 8mm カタログ番号 IJT-626808T

	品名 トライアル ラテラルコラムロックシステムプレート 10mm カタログ番号 IJT-626810T
	品名 トライアル ラテラルコラムロックシステムプレート 12mm カタログ番号 IJT-626812T

【使用目的又は効果】

使用目的

骨接合手術等の骨手術に用いる手術器械をいう。手動式のものに
限る。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前

本品は未滅菌品のため、使用に際しては必ず洗浄を行い下記の条件、又は各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行うこと。

標準的滅菌条件: 高圧蒸気滅菌法

温度	時間
121℃	20 分
126℃	15 分

2. 使用方法

使用方法については必ず手術手技書を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・併用する器械、インプラントの添付文書を必ず読んでから使用すること。

2. 相互作用

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
専用品以外の製品との併用	不具合による危険性が高まる恐れがある。	・サイズ及び規格が適合せず正しく機能しない。

3. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

- ・軟部組織の損傷
- ・一時的もしくは永久的な神経組織の損傷
- ・麻痺
- ・骨折
- ・手術による疼痛
- ・器械の破損

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。これらの不具合・有害事象の治療のため再手術が必要な場合もある。

4. 高齢者への使用

高齢者は骨が骨粗鬆化している場合が多く、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント後に緩み等が起きる可能性があるため慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 高温多湿、直射日光を避け、室温保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用前に、キズ、割れ、サビ、ひび割れ、汚れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。
- ・本品使用前に必ず使用方法等欄に示す滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行うこと。
- ・本品使用後は、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行った後、血液等異物が付着していないことを確認し、使用方法等欄に示す滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行い保管すること。

洗浄について

- ・強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるため使用しないこと。
- ・汚染除去に使用する洗剤は、必ず医療用洗剤等、当洗浄に適したものをを使用すること。
- ・洗浄及び滅菌に使用する水は蒸留水・脱イオン水を使用すること。
- ・洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使い、磨き粉、金属ブラシ等は使用しないこと。
- ・隙間部、嵌合部は柔らかいブラシ等で入念に洗浄し、異物がないことを確認すること。
- ・洗浄装置(超音波洗浄装置を含む)を使用する場合は、鋭利な器械が接触して損傷しないよう注意すること。
- ・超音波洗浄装置を使用する場合は装置の取り扱い説明書に従って洗浄すること。
- ・洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社 ウミヒラ

電話番号: 075-932-4359

[製造業者]

株式会社 ウミヒラ