

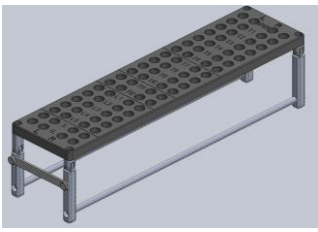

スクリューラック 2400069

【禁忌・禁止】

- ・専用品以外への使用 [「相互作用」の項参照]
- ・本器械について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】*

1. 組成 ステンレス鋼 アルミニウム合金 合成樹脂
2. 形状・構造等

| | |
|--|--|
|  | <p>品名 スクリューラック</p> <p>カタログ番号 IJS-2400069-1</p> |
|  | <p>品名 スクリューラックV2</p> <p>カタログ番号 IJS-2500607-1</p> <p style="text-align: right;">*</p> |

【使用目的又は効果】

使用目的

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械をいう。手動式のものに限る。本器械は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前

- ・防錆油を塗布している場合は、滅菌前に防錆油を洗浄除去する。
- ・滅菌を行うこと。滅菌方法は【保守・点検に係る事項】参照。
- ・必要な部品がすべてそろっていることを確認。

2. 使用方法

使用方法については必ず手術手技書を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

併用する器械、インプラントの添付文書を必ず読んでから使用すること。

2. 相互作用

| 医療機器の名称等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|--------------|---------------------|------------------------|
| 専用品以外の製品との併用 | 不具合による危険性が高まる恐れがある。 | ・サイズ及び規格が適合せず正しく機能しない。 |

3. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

- ・インプラントの破損、緩みや変形
- ・感染症
- ・器械の破損

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。これらの不具合・有害事象の治療のため再手術が必要な場合もある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:高温多湿、直射日光を避け、室温保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前

(1) 外観検査

- ・本器械使用前に、キズ、サビ、ひび割れ、汚れ、腐食、変形、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。

(2) 潤滑、動き検査

- ・ネジの緩み、接続部の緩み等がないか確認する。

(3) 滅菌

- ・滅菌の際は、足部分の引っ掛けを外した状態ですること。
- ・本器械は未滅菌品のため、使用に際しては必ず洗浄を行い下記の条件、又は各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行うこと。

標準的滅菌条件:高圧蒸気滅菌法

| 温度 | 時間 |
|-------|-----|
| 121°C | 20分 |
| 126°C | 15分 |

2. 使用后

(1) 洗浄

洗浄、すすぎ等の汚染除去を行う。

- ・徒手、もしくは手術器具に付属する工具で分解できる箇所は分解する。

・汚染除去に使用する洗剤は、必ず医療用洗剤等、当洗浄に適したものをを使用すること。

・強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるため使用しないこと。

・洗浄及び滅菌に使用する水は蒸留水・脱イオン水を使用すること。

・洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使い、磨き粉、金属ブラシ等は使用しないこと。

・合わせ部、交差部のある器械は開く・分解すること。

・隙間部、嵌合部は柔らかいブラシ等で入念に洗浄し、異物がないことを確認すること。

・中空状の器械の洗浄では、棒状のクリーナーで内部の組織・残屑を除去してから洗浄すること。

・洗浄装置(超音波洗浄装置を含む)を使用する場合は、鋭利な器

械が接触して損傷しないよう注意すること。

- ・超音波洗浄装置を使用する場合は装置の取り扱い説明書に従って洗浄すること。
- ・血液等異物が付着していないことを確認する。

(2) 乾燥

洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。

(3) 保管

保管の際は、防錆油を塗布することが望ましい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社 ウミヒラ

電話番号:075-932-4359

[製造業者]

株式会社 ウミヒラ