

* 2023年10月 (第2版)
2022年 4月 (第1版)

届出番号 : 27B2X00305000010

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70976000
プロプラス ニトリルグローブ MET PF

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

再使用禁止

【 形状・構造及び原理等 】

本品は、ニトリルゴム製、未滅菌、粉なし（パウダーフリー）
の単回使用の検査・検診用手袋です。

全長： 240mm以上

厚み： 0.05mm以上

形状：平手タイプ

表面仕上げ：T（表面の一部又は全ての表面が粗面の手袋）

【 使用目的又は効果 】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料
を取り扱う場合に患者及び使用者を交差感染から守るために
使用します。

【 使用方法等 】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料
を取り扱う場合に使用します。

【 使用上の注意 】

- 1) 体質によっては、かゆみ、かぶれ、蕁麻疹等をまれに起
こすことがあります。異常を感じたら直ちに使用を中止
し、適切な措置を施してください。
- 2) 万が一、製品が破損、汚損している場合や製品に破損や
ピンホールなどの異常が認められる場合は、使用しない
でください。
- 3) ハサミ、メス等の鋭利なもので傷つけないように、ご注
意ください。
- 4) 火、熱、熱湯等の熱源に直接触れないように、ご注意く
ださい。
- 5) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするの
で、ご確認の上使用ください。

【 保管方法及び有効期間等 】

- 1) 保管方法
品質保持のため、直射日光、オゾン、高温多湿での保管
は避けてください。
- 2) 使用期限
別途記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：宇都宮製作株式会社
大阪府東大阪市本庄西1- 5 -1
TEL：0120-74-2321

製 造 元：スリートラン グローブ タイ
Sri Trang Gloves (Thailand) Public
Company Limited.