

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70976000

プロプラス ニトリルライトタッチ ME-PF ホワイト

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

再使用禁止

【 形状・構造及び原理等 】

本品は、ニトリルゴム製、未滅菌、粉なし（パウダーフリー）の単回使用の検査・検診用手袋です。

全長：230mm以上

厚み：0.05mm以上

形状：平手タイプ

表面仕上げ：T（表面の一部又は全ての表面が粗面の手袋）

【 使用目的又は効果 】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に患者及び使用者を交差感染から守るために使用します。

【 使用方法等 】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に使用します。

【 使用上の注意 】

- 1) 体質によっては、かゆみ、かぶれ、蕁麻疹等をまれに起こすことがあります。異常を感じたら直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- 2) 万が一、製品が破損、汚損している場合や製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は、使用しないでください。
- 3) ハサミ、メス等の鋭利なもので傷つけないように、ご注意ください。
- 4) 火、熱、熱湯等の熱源に直接触れないように、ご注意ください。
- 5) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするので、ご確認の上使用ください。

【 保管方法及び有効期間等 】

- 1) 保管方法
品質保持のため、直射日光、オゾン、高温多湿での保管は避けてください。
- 2) 使用期限
別途記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：宇都宮製作株式会社
大阪府東大阪市本庄西1-5-1
TEL：0120-74-2321

製造元：Ever Global (Vietnam) Enterprise Corp.