

添付文書

製造販売届出番号 27B3X00163000002

作成日：平成 19 年 10 月 10 日

歯科材料 8 歯科用石膏及び石膏製品

歯科高温鑄造用埋没材 70900020

オー - ジー

OH-G ベスト

【形状・構造】

本材は、下記成分により構成される

| 形状 | 成分 |
|----|------------------------------|
| 粉末 | シリカ 酸化マグネシウム リン酸アンモニウム |

【性能、使用目的、効能又は効果】

歯科高温用埋没材

| | | |
|------------------|---------|-------|
| 混水量（粉 100g に対して） | 18～19ml | |
| 見掛凝固時間 | 4～10 分 | |
| | 専用液 | 水 |
| 凝固膨張 | 1. 1 | 0. 1 |
| 熱膨張 | 1. 2 | 0. 8 |
| 総膨張 | 2. 3% | 0. 9% |

【操作方法又は使用方法】

- ① 混水量は本品粉末 100g に対し、水又は専用液 18～19ml です。
- ② 練和時間は 20～25 秒練和してください
- ③ リングに埋没します。（リング内側にセラミックリボンを内装）
- ④ 埋没後 約 60 分、電気炉で 850℃で焼成し、30 分係留後 800℃にて鑄造します。

【使用上の注意】

- ① 使用注意
 - 本材を扱う際には、粉塵による人体の影響を避けるため、居所吸塵装置、防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - 本材の硬化体を破碎する際は、目の損傷を防ぐため、保護メガネなどの防具を使用すること。
 - 本材は、歯科高温鑄造用埋没材の用途以外には使用しないこと。
 - 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

② 重要な基本的注意

本材が眼に入らないよう注意すること。万一眼に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。


【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(貯蔵・保管方法)

- 本材は、高温・多湿の場所は避けて保管すること。
- 開封後は、密封して保管すること。
- 本材は歯科の従事者以外は触れないように、適切に保管・管理すること。

(有効期限・使用期限)

1. 本材は包装に記載の製造日より半年以内に使用すること。
2. 記載方法

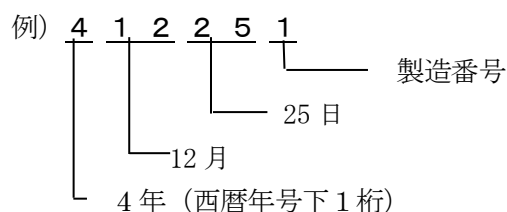

【包装】

3 k g アルミ袋入り

1 8 k g 箱入り（3 k g アルミ袋入り×6袋）

【製造販売業者 氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社ウェイナ総合研究所

住 所 〒561-0845

大阪府豊中市利倉 2 丁目 20-1

電 話 06-4866-7301

製造業者 丸石石膏株式会社

住 所 大阪市鶴見区放出東 1 丁目 5-18

電 話 06-6967-5141