

添付文書

一般医療機器

作成日 平成 20 年 5 月 1 日

製造販売届出番号 27B3X00163000007

歯科材料 6 歯科用印象材料
歯科複模型用寒天印象材 70538000

OH ゲル(オーゲル)

【形状・構造】

本材は下記成分により構成される

形状	成分
軟質の固定(ゲル状)	寒天 グリセリン 水 食用色素(緑) 防腐剤

【性能、使用目的、効能又は効果】

- 金属床製作に際し高温鑄造用埋没材で耐火模型を作るため、石膏模型を印象する寒天印象材です。

【操作方法又使用方法】

- ① 通法により 90℃以上で溶解する。
- ② 55℃まで自然放冷する。
- ③ 用意した石膏模型を入れた寒天フラスコに流し込む。
- ④ 冷水を用いて冷やし固化させ、石膏模型を取り出す。
- ⑤ 通法により、練和させた歯科高温用鑄造用埋没材を流し込み固化させ、耐火模型を制作する。

【使用上の注意】

- 食用にしないこと
- 本材は歯科高温鑄造用埋没材の複模型製作以外には使用しないこと。
- 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 流し込む鑄造用埋没材が石膏系の時は、本材は使用できません。

【貯蔵・保管方法】

- 購入後は冷蔵庫に保管してください。
- 歯科の従業者以外は触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期限・使用期間】

- 包装に記載の製造日より半年以内に使用すること。
- 記載方法
4 12 25 1
年(西暦年号下 1 桁)、月、日、製造、ロットを表わします。

【包装】

- 3 kg ビニル袋入

【製造販売業者氏名又名称及住所等】

製造販売業者

株式会社 ウェイナ総合研究所

住所 〒561-0845

大阪府豊中市利倉 2 丁目 20-13

電話 06-4866-7301

製造業者 同上