

添付文書

一般医療機器

作成日 平成 22 年 5 月 21 日

製造販売届出番号 27B3X00163000021

器具器械

歯科技工用研削・研磨器材キット

OHポリッシャー

※取扱説明書を必ず参照

【形状・構造及び原理等】

原理は研磨材と補綴物を入れた容器を自転－公転の回転をさせ、遠心力により補綴物が研磨されるものです。

※詳細は取扱説明書を必ず参照。

【使用目的】

金属床・パークラスプ等の金属製補綴物からレジン床等の補綴物を自動研磨するものです。

【品目仕様】

- 入力電源 単相 AC100V 50/60 Hz
- 回転方式 公転・自転＋縦回転・横回転 切替わり
- 研磨容器 2 槽

【操作方法又使用方法】

- 研磨容器に研磨材と補綴物と水とコンパウンド液を規定量を入れます。(詳細は取扱説明書を参照)
 - 電源スイッチを入れ、ON押ボタンを押すとモータが回転し自動研磨を開始します。
- ※ 詳細は取扱説明書を必ず参照。

【使用上の注意】

○ 容器の取付

①容器を装着しないままで、運転しないで下さい。

②両方の容器の重量がなるべく均等になるように調整してください。

片方の容器だけで運転しないで下さい。

③左右の重量差が 100 g 以内を目途にしてください。

片側の研磨槽だけで行う場合は、もう片側へ研磨材を入れてバランスをとって下さい。微調整は水を加えて行ってください。

※ 差が大きい場合は、機械の揺れが大きくなり故障の原因になる場合がありますので注意してください。

④容器受けの切欠き部に容器の回り止めキーがはまるように入れてください。

⑤ロックバーを取り付けた後の、ロックねじはしっかりと締めてください。

ゆるいと外れる危険性があります。

【包装】

- ビニールで包み、ダンボール箱入。

【製造販売業者氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社ウェイナ総合研究所

住所 〒561-0845

大阪府豊中市利倉 2 丁目 20-13

電話 06-4866-7301

製造業者 同上