

2017 年 5 月 (第 3 版)

2016 年 8 月 (第 2 版)

歯 0 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 7 0 9 0 1 0 0 0
歯科用アブレイブディスク 3 5 8 0 7 0 0 0
ブラックセパレーティングディスク

【形状、構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

歯科技工用及び歯科用として研削に用いる。

【使用方法等】

円形で平坦なシートの中央の穴にマンドレルを固定し、回転させて使用する。

【使用上の注意】

使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 強度が有り、芯振れの無いマンドレルに確実に装着し、15,000～20,000rpm で使用すること。最高使用回転数を超えると、破折して怪我をする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 2) 使用する前に予備回転を行い、振れが無いことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

使用上の注意

- 1) 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等使用すること。
- 2) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないようにすること。
- 3) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社ウィルデント

電話：06-6367-0073