

吸引ノズル

*【禁忌・禁止】


- ・吸引ノズルは鼻に軽く押し当てるようにしてご使用ください。鼻の奥深くに吸引ノズルを無理に入れないでください。
- ・鼻の穴に傷、炎症、出血などが見られる場合は、使用しないでください。

*【使用上の注意】

- ・初めて、又は長期間保管後にご使用になるときは、本品をよく洗浄してからご使用ください。
- ・ご使用後は必ず洗浄し、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。吸引ノズルを誤飲する恐れがあります。
- ・本書に記載されている使用目的以外の用途で使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

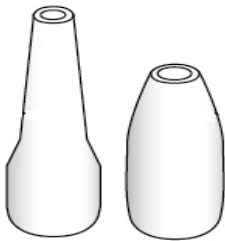

右図：吸引ノズル 1

左図：吸引ノズル 2

2. 原理

電動式吸引器に接続して得られた陰圧によって、鼻腔内の鼻水を吸引する。

3. 原材料

シリコーンゴム

* 4. 組み合わせて使用する電動式吸引器

ヒュービディックジャパン株式会社が製造販売する鼻水吸引器に接続して、ご使用ください。

【使用目的又は効果】

治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節する。
本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

*【使用方法等】

- 1)吸引ノズル 1 又は吸引ノズル 2 を、鼻水吸引器に取り付ける。
- 2)吸引ノズルを鼻の穴に軽く押し当てて、鼻水を吸引する。
- 3)鼻水の吸引が終了したら、吸引ノズルを鼻水吸引器から取り外し、流水で洗浄した後十分に乾燥させてから保管する。

※吸引ノズルの使い分け

鼻の穴が小さく、吸引ノズル 1 でうまく吸引できないときは、先端が細い吸引ノズル 2 を使用する。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社

東京都八王子市北野町 507-6

電話：042-649-1920

製造業者：HuBDIC Co., Ltd

大韓民国