

UG検体採取キット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止 [感染のおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

- コパン eSwab
- 取扱説明書
- スピッツ
- スクリュースピッツ
- スポイト
- カップ
- チャック袋

【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取すること。

【使用方法等】

- チューブから綿棒を取り出す。
- スワブで検体を採取する。
- 綿棒をもとのチューブに戻す。
[詳細は、取扱説明書を参照ください]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 共通する注意事項
 - 使用にあたっては、必ず取扱説明書を参照してください。
 - 次の事項に該当するものは使用しないでください。
 - 液漏れの痕跡が認められるもの
 - パウチが開いているもの
 - その他の劣化、破れ、破損、折れ曲がりが見られるもの
 - 検体採取時に、軸部分に力がかかり過ぎる、強く推す、過度の振じれ、負荷がかかるような使い方をしないでください。また、軸を曲げる、反らす、折る等の意図的な変形を加えないでください。
 - チューブに含まれる保存液は、皮膚、粘膜または目に付着させたり飲んだりしないように十分に注意してください。もし誤って付着もしくは飲んだ場合には直ちに多量の水で洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当を受けてください。
 - 包装されたパウチ内のチューブとスワブの組み合わせで使用してください。異なるチューブとスワブの組み合わせは検証されておらず、本品の性能と検査結果に影響する可能性があります。
 - 汚染を避けるため、検体採取時及びチューブ内へのスワブ挿入時に切断点よりも下の部分（チップから切断点までの部分）に触れないように注意してください。
 - 本品の使用により化膿・発疹・発赤、かゆみ等の症状がある場合には使用を中止し医師又は薬剤師に相談してください。
 - スワブの先端が液中に入っていること、キャップがしっかり閉まっていることを確認してください。
 - 検体採取後は速やかに検査に供してください。
 - 妊婦の泌尿生殖器からの検体採取については検証されていません。

- 包装が破損、汚損している場合は、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。また、汚染される可能性があるため、滅菌包装は検体採取時まで開封しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

5～25℃（コパン eSwab）で保存

<有効期間・使用期限>

使用期限はラベルに記載。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：内田技研株式会社

電話番号：03-3500-2800