

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN 70903000

KENDA QUEENシリコンポリッシャー

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状 (代表モデル)
HP (軸径 : 2.35mm)



2. 材質
作業部 : シリコンカーバイド、シリコンゴム
軸 部 : ステンレススチール
3. 原理
歯科用ハンドピース等に装着し回転させ、作業部に成型された研磨材で研磨する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社エスエスデンタル工業所
電話番号 : 052-331-2438
製造業者 : KENDA AG Dental Manufacturing
国名 : リヒテンシュタイン

*【使用目的又は効果】

金属、プラスチック、レジン、及び同様の材料の研磨に用いる。

*【使用方法等】

- ①使用目的にあった適切なサイズのものを選び、破損等の異常が無いことを確認する。
- ②歯科用ハンドピース等に装着し、適切な速度で回転させ、ソフトタッチで研磨する。
- 最高回転数 : 15,000 回転/分

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・ 最高回転数以下で使用する。
- ・ 強く押しつけるような過度の加圧使用はしない。
- ・ 押し込んだり、テコのようには使用しない。
- ・ 本品の装着は底部まで確実に挿入すること。(装着方法又は装着に関する注意事項はハンドピースメーカーの取扱説明書又は添付文書で確認し、その指示に従うこと。)
- ・ 使用前に予め回転させ、正常であることを確認すること。
- ・ 曲がっている、狂っている又は損傷している、型崩れしているものは使用しない。
- ・ 使用する機器は完全に清掃・整備されていること。
- ・ 目の損傷を防ぐために防護メガネを着用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光のあたる場所、高温になる場所は避けて冷暗所で保管すること。
- ・ 乾燥した場所で保管すること。