

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000

## KENDA レーズブラシ

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状



#### 2. 材質

作業部 : ヤギ毛、マイクロファイバー

取付部 : プラスチック

#### 3. 原理

ヤギ毛又はマイクロファイバーが表面をこすり研磨する。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社エスエスデンタル工業所

電話番号 : 052-331-2438

製造業者 : KENDA AG Dental Manufacturing

国名 : リヒテンシュタイン

### \*【使用目的又は効果】

金属、プラスチック、レジン、及び同様の材料を研磨するために用いる。

### \*【使用方法等】

#### 1. 使用方法

①異常がないことを確認する。

②歯科技工用レーズに取り付けて研磨する。

[最高回転数]

3,600rpm

### \*【使用上の注意】

- ・ 最高回転数以下で使用する事。
- ・ 確りと固定すること。
- ・ 使用前に予め回転させ、正常であることを確認すること。
- ・ 使用する機器は完全に清掃・整備されていること。
- ・ 目の損傷を防ぐために防護メガネを使用すること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光のあたる場所、高温になる場所は避けて冷暗所で保管すること。
- ・ 乾燥した場所で保管すること。