

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000
HEINE 双眼ルーペ

【形状・構造及び原理等】

概要
双眼のルーペにより対象物を拡大する。
ルーペ光学部は眼鏡、ヘッドバンド等により装着する。また作業
野に光を供給する照明器と接続して使用することもできる。

形状（代表製品写真）



品目仕様

倍率、作業距離：

タイプ	倍率	作業距離（mm）				
		250	340	420	450	520
HR	2 倍	○*	○	○		○
	2.5 倍	○*	○	○		○
HRP	3.5 倍			○		
	4 倍		○			
	6 倍		○			
HR-C	2.5 倍		○	○		
C2.3	2.3 倍		○		○	

*クローズアップレンズ併用時

瞳孔間距離： 50～70mm

【使用目的又は効果】

外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けるレンズから成る
システムをいう小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られ
る。観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】

1. 双眼ルーペ本体（光学部）が取り付けられたヘッドバンドまた
は眼鏡を装着する。
2. 光学部を眼に近づけ、PD（瞳孔間距離）を合わせる。
3. ルーペ越しに対象物の拡大像を観察する。

【保守・点検に係る事項】

- 使用者による保守点検事項
1. 洗浄、消毒
 - ・使用前には正常で安全な作動を確認すること。
 - ・本体は洗浄剤や消毒剤を湿らせた柔らかい布で清拭すること。洗
浄剤や消毒剤を直接かけないこと。
 - ・塩素・ヨウ素系、強酸・強アルカリ性等、本器に悪影響を及ぼす
おそれのある薬剤の使用は避けること。
 2. 点検
 - ・眼鏡、ヘッドバンド等にしっかりと装着されているか点検する。
 - ・レンズやフレームに瑕疵が無いか確認する。
 - ・点検頻度：使用前

業者による保守点検事項

- ・本製品の修理やオーバーホールが必要な際は製造販売元に依頼
すること。
- ・オーバーホール点検頻度（推奨）：1 年毎

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
株式会社エムイーテクニカ
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-34-4
TEL：03-5395-4588 FAX：03-5395-4866

製造業者：
ハイン オプトテック / Heine Optotechnik GmbH & Co. KG
ドイツ