

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010
クリアスコープ

【形状・構造及び原理等】

写真



原材料

アダプタ : ポリ塩化ビニル、ナイロン(30%ガラス繊維入り)
拡大レンズ : ガラス、アルミニウム

【使用目的又は効果】

- ・内視鏡画像を得るため、内視鏡とスマートフォンを接続させる。

【使用方法等】

- ・スマートフォンを本機器のスマートフォン固定台に取り付け、内視鏡を直接固定台へ、あるいは、固定台に接続された付属の拡大レンズに接続させる。

【使用上の注意】

- ・使用の際は、本機器が完全に乾いた状態である事を確認する。
- ・水のかからない場所にて使用すること。
(スマートフォン固定台は防水仕様だが、拡大レンズは防水ではない)
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所にて使用すること。
- ・本体に傷や凹み等の破損や異常がないか確認すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前には正常で安全な作動を確認すること。
- ・汚れはアルコールを浸した柔らかい布で汚れをふき取ること。
- ・オークレーブ滅菌や、研磨剤、塩素、ヨウ素、強酸、強アルカリ等、本機器に悪影響を及ぼすおそれのある薬剤の使用は避けること。
- ・殺菌/消毒、その他手入れの方法については、施設で定めた規定に従うこと。

業者による保守点検事項

- ・特別なクリーニングや点検が必要な際は製造元に依頼すること。
- ・故障した際は、故障の旨を適切に表示して保管し、製造元に修理を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

- ・汚れ及び水分を完全に除去してから保管すること。
- ・清潔で水のかからない場所で、常温にて保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄成分等を含んだ空気等により悪影響を生ずるおそれのない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社エムイーテクニカ
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-34-4
TEL: 03-5395-4588 FAX: 03-5395-4866

製造業者:

エルディーツール&ダイ
/ L-D Tool & Die (Division of MADIX Engineering Inc
カナダ