

2022 年 10 月（第 1 版）

医 04 整形用品

一般医療機器 熱傷被覆・保護材 11322101

## アルデルム救急包帯

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

パッド：アルミ蒸着した不織布の表層材と水は弾き空気を通す裏面ポリエチレン系の不織布との間に、吸水性の高いポリエステル系不織布を配した三層構造で出来ている。

包帯：伸縮性包帯

### 【使用目的又は効果】

火傷皮膚を被覆及び保護し、火傷部位の滲出液を吸収するためと、創傷部位の支持等に用いる。

### 【使用方法等】

滅菌袋を開き、本品を取り出し創傷部にパッド部分をあて、パッドと一体の包帯で固定してください。

### 【使用上の注意】

- ・本品の使用中に創傷部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- ・本品の使用中に濡れたり、汚れたりした場合には、直ちに新しいものと、取り替えてください。
- ・使用時に包装に汚損、破損、水濡れなどが見られた場合には使用しないでください。
- ・本品は開封後直ちに使用してください。
- ・本品は裏面に表示している期限内に使用してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### \*\*1.保管方法

高温多湿を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

#### \*\*2.有効期間

\*\*本品の有効期間は滅菌袋に表示[製造業者による]

\*



創傷の大きさにアルデルム救急包帯を選んで、ご使用ください。

アルデルム救急包帯(小)

アルデルム救急包帯(中)

アルデルム救急包帯(大)

アルデルム救急包帯(特大)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：栄和産業株式会社

住 所：東京都江東区深川 1-1-5

電 話：03-6458-5071(代)

製造業者：\*\*ドイツ国 W.Soehngen GmbH  
(ゼーエンゲン社)

\*