

2022年10月(第1版)

医04整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

デルモテクト ドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再 使 用 禁 止

【形状・構造及び原理等】

ポリエステル系不織布で出来ている。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

滅菌袋を開き、本品を取り出し創傷部にパッド部分をあて、包帯又は、テープ等で固定する。

【使用上の注意】

- ・本品の使用中に創傷部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し適切な治療を行ってください。
- ・本品の使用中に濡れたり、汚れたりした場合には、直ちに新しいものと、取り替えてください。
- ・使用時に、包装にお損、破損、水濡れなどが見られた場合には使用しないでください。
- ・本品は開封後直ちに使用してください。
- ・本品は裏面に表示している期間内に使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

*1.保管方法

高温多湿を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

*2 有効期間

使用の期限 滅菌袋に記載製造業者による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 栄和産業株式会社

住 所 : 東京都江東区深川1-1-5

電 話 : 03-6458-5071(代)

製造業者 : ドイツ国 * W.Soehngen GmbH
(ゼーンゲン社)