

2022 年 10 月（第 1 版）

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

圧迫包帯(止血専用包帯)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエステル系不織布とポリプロピレン不織布をロール状に巻き込みポリアミド製の収納袋に収納し、伸縮性包帯を収納袋に縫い合わせたもの。

本品は滅菌済みである。

パッド :ポリアミド伸縮性収納袋
:ポリエステル系不織布（厚さ 2.0 mm）
:ポリプロピレン不織布（厚さ 0.2 mm）

包 帯 :伸縮性包帯

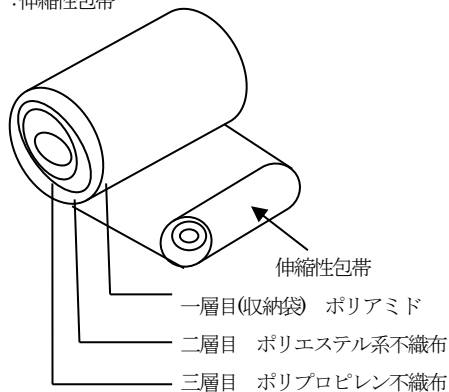

- ・一層目(収納袋)ポリアミド（吸収性）
- ・二層目ポリエステル系不織布(撥水性厚さ 2 mm)
- ・三層目ポリプロピレン不織布(速乾性厚さ 0.2 mm)

【使用目的又は効果】

創傷の被覆及び保護、出血の抑制、創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

滅菌袋を開き、本品を取り出し、ロール状部分を創傷部に当て一体となっている伸縮性包帯で固定します。付属の包帯止めで伸縮性包帯を止めます。

【使用上の注意】

- ・本品の使用中に創傷部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し適切な治療を行ってください。

- ・本品の使用中に濡れたり、汚れたりした場合には、直ちに新しいものと、取り替えてください。
- ・本品を使用するとき、包装にお損、破損、水濡れなどが見られた場合には使用しないでください。
- ・本品は開封後直ちに使用してください。
- ・本品は裏面に表示している期間内に使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

高温多湿を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

2.有効期間

滅菌袋に記載（製造業者による）



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 栄和産業株式会社

住 所 : 東京都江東区深川 1-1-5

電 話 : 03-6458-5071(代)

製造業者 : ドイツ国 W.Soehngen GmbH

(ゼーンゲン社)