

**2017 年 3 月 (第 4 版) (新記載要領に基づく改訂)

*2015 年 11 月 (第 3 版)

届出番号 13B3X00554000004

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

ダーマケア ドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再 使 用 禁 止

【形状・構造及び原理】

ポリエステル系不織布で出来ている。

【使用目的又は効果】

創傷の被覆及び保護、出血の抑制、創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

滅菌袋を開き、本品を取り出し創傷部にパッド部分をあて、包帯又は、テープ等で固定する。

【使用上の注意】

- ・本品の使用中に創傷部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し適切な治療を行ってください。
- ・本品の使用中に濡れたり、汚れたりした場合には、直ちに新しいものと、取り替えてください。
- ・使用時に、包装にお損、破損、水濡れなどが見られた場合には使用しないでください。
- ・本品は開封後直ちに使用してください。
- ・本品は裏面に表示している期間内に使用してください。

【保管方法及び有効期間等】


**1.保管方法

高温多湿を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

**2.有効期間:

滅菌袋に記載〔製造業者による〕

*

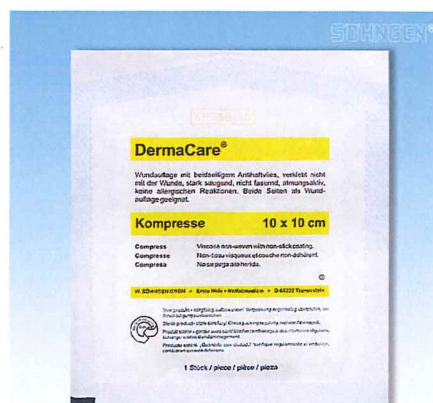

創傷の大きさで、ダーマケアドレッシングを選んでご使用ください。

ダーマケアドレッシング 10 × 10 cm

ダーマケアドレッシング 20 × 20 cm

ダーマケアドレッシング 30 × 40 cm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 栄和産業株式会社

住 所 : 東京都江東区深川 1-1-5

電 話 : 03-6458-5071(代)

製造業者 : ドイツ国 W.SoeHNgen GmbH
(ゼーンゲン社)

*