

*2017 年 3 月 改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

2014 年 6 月 11 日（新様式第 1 版）

届出番号 13B3X00554000010

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

バーダントッチ ドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再 使 用 禁 止

【形状・構造及び原理等】

ガーゼの材質：ポリプロピレン 100%

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

- ・適宜使用すること。
- ・滅菌袋を開き、本品を取り出し創傷部位全体を覆うこと。

【使用上の注意】

- ・本品の使用中に創傷部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し適切な治療を行ってください。
- ・本品の使用中に濡れたり、汚れたりした場合には、直ちに新しいものと、取り替えてください。
- ・使用時に、包装にお損、破損、水濡れなどが見られた場合には使用しないでください。
- ・本品は開封後直ちに使用してください。
- ・本品は裏面に表示している期間内に使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

*1.保管方法

高温多湿を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

*2.有効期間

滅菌袋の裏面に記載〔製造業者による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：栄和産業株式会社

住 所：東京都江東区深川 1-1-5

電 話：03-6458-5071(代)

製造業者：ドイツ国 W.Soehngen GmbH
(ゼーゲン社)