

*2017 年 3 月 改訂(第 2 版) (新記載要領に基づく改訂)

2014 年 6 月 (新様式第 1 版)

届出番号 : 13B3X00554000011

医 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 34864000

アルデルム アルプラスト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

- ・小児の手が届かないところに保管ください。
- ・直射日光や高温多湿の場所を避け、清潔な場所に保管してください。

*2. 有効期間 :

製造日より 5 年間、パッケージに記載 [製造業者による]

【形状・構造及び原理等】

パッド : アルミ蒸着した不織布の表層材と、裏面の通気性のあるポリエチレン系の不織布の間に吸収性の高いポリエステル系の不織布を配した三層構造で出来ている。

粘着テープ : ポリエステル系の不織布

粘着剤 : ポリアクリル接合剤

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 栄和産業株式会社

住 所 : 東京都江東区深川 1-1-5

電 話 : 03-6458-5071(代)

【使用目的又は効果】

傷口の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持等に用いる。

製造業者 : ドイツ国 * W.Soehngen GmbH
(ゼーングン社)

【使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面にあてて周りのテープでしっかり固定してください。

【使用上の注意】

- ・傷口の周りを清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- ・パッド部分が汚れたり水に濡れた場合は新しいものに貼り換えてください。
- ・皮膚刺激の原因になることがあるので、テープを同じところに繰り返し貼らないでください。
- ・使用後はがすときは、患部や周りの皮膚を傷めないようにゆっくりとはがしてください。
- ・本品の使用中に、発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談してください。
- ・1 日 1~2 回貼り換えてください。
- ・本品は開封後、直ちに使用してください。
- ・小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとにご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法