

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000
マイクロスピード フットスイッチ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



GD662 : マイクロスピード EC 用

GD662M : マイクロスピード ユニ用



GD668 : マイクロスピード ユニ用



GD671 : マイクロスピード ユニ用

2. 原理

電動式骨手術器械に接続し、本品のペダルを踏むことでモーターを作動させる。また、モーターの回転スピードはペダルの押し下げられる距離で制御する。

【使用目的又は効果】

電動式骨手術器械と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるケーブル、スイッチ及びアダプタ等をいう。

***【使用方法等】**

本品をコントロールユニットに接続し、ペダルを踏み込むことによってモーターの回転スピードを制御する。
付属のボタンを押すことでイリゲーションポンプのオン・オフ、正逆回転を切り替える。

使用方法等に関連する使用上の注意

- 本器は洗浄・滅菌は出来ない。
- 使用前に必ず本器の状態と機能を確認すること。
- ビー・ブラウンエースクラップ製品のみと組み合わせて使用すること。
- 爆発の危険性のあるエリアでの使用は避けること。
- 持ち上げる際はハンドルを掴んで行うこと。ペダルを掴んで持ち上げると破損する場合がある。
- 汚れた場合は清拭すること。
- フットスイッチコードの着脱は正しく行い、断線させないようにすること。

***【保管方法及び有効期間等】**

水濡れ、高温、多湿、日光の当たる場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】*使用者による保守点検**

- コントロールユニットと接続し、各機能において正常に器械が作動することを確認すること。
- 使用後は清拭すること。
- 2年に一度、メーカーによるオーバーホールを受けること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

** 問い合わせ窓口：0120-401-741

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG