


機械器具 29 電気手術器  
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000  
**ELAN 4 エレクトロフットスイッチ**

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状

GA808

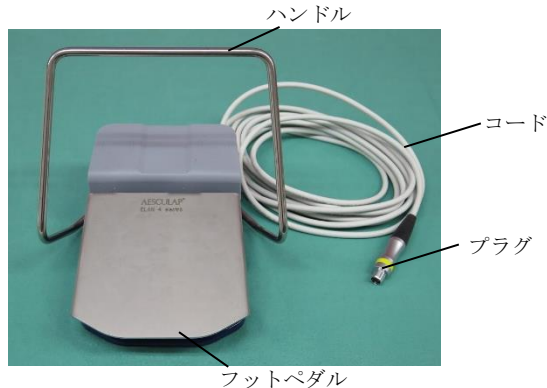

## 2. 原理

手術用電気機器として使用される自社専用医療機器に接続し、フットペダルを踏み込むことで制御する装置の信号等を伝達し、電源を供給する。

**【使用目的又は効果】**

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間に信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられる。

**【使用方法等】**

- 本品は、ビー・ブラウンエスクラップ社製品と組み合わせて使用すること。
- 1. 使用前の準備
  - 1) 自社専用電気機器（以下、コントロールユニットという）（本品に含まない）と本品を準備する。
  - 2) コントロールユニットの正面パネルの専用ソケットに本品のコードを接続する。
  - 3) コントロールユニットの電源を入れ、モーターケーブル（本品に含まない）を接続する。
  - 4) モーターケーブルに任意のモーターハンドピース（本品に含まない）を、モーターハンドピースにツール（本品に含まない）を接続する。
- 2. 使用方法
  - 1) 本品の操作にてコントロールユニットを作動させる。
- 3. 使用後の処置
  - 1) コントロールユニット及び本品の接続を OFF 状態にし、モーターが動かない状態になっていることを確認する。
  - 2) 本品をコントロールユニットから取り外す。

使用方法等に関連する使用上の注意

## &lt;使用前&gt;

- 使用前に必ず本品の状態と機能を確認すること。

## &lt;使用中&gt;

- 爆発の危険性のあるエリアでの使用は避けること。

- 持ち上げる際はハンドルを掴んで行うこと。ペダルを掴んで持ち上げると破損する場合がある。

## &lt;使用後&gt;

- 汚れた場合は清拭すること。
- フットスイッチコードのコントロールユニットからの着脱はプラグを保持して行い、コードを断線させないようにすること。

**【使用上の注意】**

## 1. 不具合・有害事象

## &lt;その他の不具合&gt;

- コードの断線
- 破損
- 通電不良

**\*【保管方法及び有効期間等】**

## &lt;保管方法&gt;

水のかからないところで、高温、多湿、日光の当たる場所を避けて保管すること。

**\* <一般保証に関して>**

本製品は、正常な使用状態で発生する故障について、購入（本製品納入日）より 1 年間無償で修理を行う。

ただし、保証期間内でも以下の場合是有償修理になる。

- 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷
- 不当な修理、調整、改造された場合
- 取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷
  - 落下による損傷を含む
  - マニュアル洗浄する場合、洗浄設備に不備がありメーカー指定の洗浄方法を実施しない場合も含む
- 本製品を接続している他の機器、または不適当な「消耗品」のご使用に起因して製品に生じた故障・損傷の場合。
- 「有寿命部品」や「消耗品」（バー、ブレード、バッテリーセル等）の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合。

**【保守・点検に係る事項】****使用者による保守点検**

- 手術使用前に本体と接続し、各機能において正常に本品が作動することを確認すること。
- 使用後は清拭すること。

**業者による点検**

- 1 年に一度、メーカーによるオーバーホールを受けること。

**洗浄・消毒（注意事項）**

- 洗浄剤、消毒液はステンレススチール、プラスチック、シリコン等に影響の無いものを使用すること。

**ペダルの着脱**

- ペダルを起こす。
- ペダルを横にスライドさせてヒンジ部のガイドボルトから外す。
- ペダルを上を外す。
- 清拭後は、逆の手順でペダルをセットする。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

\* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG