

機械器具 38 医療用鉤  
一般医療機器 鉤 35105000  
シリコンコーティング脳ペラ

## 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

## 再使用禁止

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

\* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状・構造



## 2. 原材料

- ・ ステンレススチール
- ・ シリコンレジン

## 3. 原理

遠位部にて創傷部や術部の組織などを拡げる。

**【使用目的又は効果】**

脳外科手術時に創傷部や術部の組織などを拡げるために用いる。

**【使用方法等】**

1. 本品は滅菌品なので開封後直ちに使用すること。
2. 遠位部にて創傷部や術部の組織などを拡げる。

## &lt;使用方法等に関連する使用上の注意&gt;

- ・ 溶液（例：生理食塩水、次亜塩素酸ナトリウム、ヨード系含有消毒剤など）にはステンレススチールに腐食や孔食を起しやすいため長時間の接触を避ける、接触後は迅速に洗い流すこと。
- ・ マイクロサージェリー用手術器械は特に傷つきやすいので、取扱いには十分注意すること。
- ・ 血液や組織片は局方精製滅菌水をひたしたリントフリークロス®の柔らかい布でこまめに清拭すること。

**【使用上の注意】**

不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

## [重大な不具合]

- ・ 不適切な取り扱いにより破損、変形、屈曲が生じる可能性がある。

## [重大な有害事象]

以下のような有害事象が発現した場合は、直ちに適切な処置を行うこと。

- ・ 不適切な取り扱い、使用方法により血管、神経の損傷

以上の有害事象の治療のため、再手術が必要な場合もある。

**【保管方法及び使用期間等】**

- 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。
- 湿気や熱に直に晒されない場所に保管すること。