

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 保護栓 70280000
コンビキャップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表例）>



<原材料>

- 高密度ポリエチレン

<原理>

蓋の役割をし、内容物の漏れを防止し、無菌状態を保つ。

【使用目的又は効果】

用具の内容物の漏れを防止し、使用するまで内容物の無菌状態を維持するために用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

汚染に十分注意した上で包装から取りだし、接続対象製品のメス又はオスルアー部に接続する。

**** 【使用上の注意】****** 1. 使用方法等に関連する使用上の注意**

本品は、ISO80369-7 に規定されているものとは異なる代替小口径コネクタである。医療従事者は本品の使用に際し、そのリスクを鑑み判断したうえで誤接続防止の対策をとり使用すること。[本品と異なる代替小口コネクタを使用する医療機器と誤接続のおそれがある]

2. 重要な基本的注意

** 本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない。

3. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

<重大な不具合>

- 不適切な取り扱い、管理により破損、ひび割れが生じる可能性がある。
- 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

本品は滅菌品で、使用期限は外箱に記載。〔自己認証による。〕

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メルズンゲン、ドイツ

B.Braun Melsungen AG

*** 販売元：ニプロ株式会社**

問い合わせ窓口：フリーダイヤル 0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）