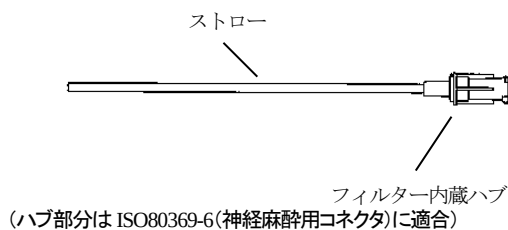


機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000
フィルターストロ

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**<構造図(代表例)>****<材質>**

- ・ ストロー:PVC 又は PVC-P
- ・ ハブ:ABS
- ・ フィルター:PA

【使用目的又は効果】

薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

【使用方法等】

- ・ 汚染に十分に注意した上で包装内から取りだし、シリンジの先端に接続する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・ 本品のハブ部は、ISO80369-6 (神経麻酔用コネクタ規格)対応のため、ISO80369-6 に適合する製品と接続すること。

【使用上の注意】**<不具合・有害事象>**

以下の不具合が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- ・ 製品の変形、破損、ひび割れ等
- ・ 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

- ・ 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 使用期間

- ・ 使用期限は外箱を参照のこと。〔自己認証による。〕

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元:ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

* 問い合わせ窓口:TEL 0120-401-741

製造元:ビー・ブラウン メルズンゲン (ドイツ)

B.Braun Melsungen AG Germany