

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000  
フィルターストロー


## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

## \*\*【形状・構造及び原理等】

## &lt;構造図(代表例)&gt;

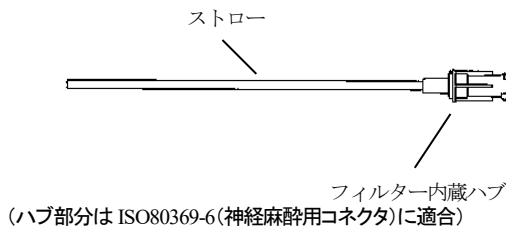

## \*\*&lt;材質&gt;

- ・ストロー:PVC 又は PVC-P
- \*\*・ハブ:ABS 又は ABS+SAN 共重合体
- ・フィルター:PA

## 【使用目的又は効果】

薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

## 【使用方法等】

- ・汚染に十分に注意した上で包装内から取りだし、シリンジの先端に接続する。

## &lt;使用方法に関連する使用上の注意&gt;

- ・本品のハブ部は、ISO80369-6(神経麻酔用コネクタ規格)対応のため、ISO80369-6 に適合する製品と接続すること。

## 【使用上の注意】

## &lt;不具合・有害事象&gt;

以下の不具合が発現する可能性がある。

## [重大な不具合]

- ・製品の変形、破損、ひび割れ等
- ・液漏れ

## 【保管方法及び有効期間等】

## 1. 保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

## 2. 使用期間

- ・使用期限は外箱を参照のこと。[自己認証による。]

## \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

\* 問い合わせ窓口:TEL.0120-401-741

製造元:ビー・ブラウン メルズンゲン アーゲー、ドイツ