

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000
セーフサイトSP


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

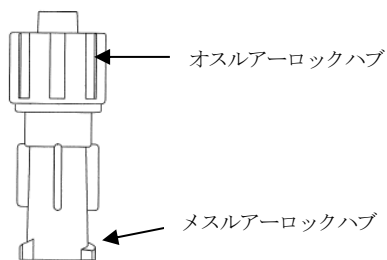

<材質>

- 本体：ABS
- フィルタ：ポリアミド

<原理>

本品の先端部はシリンジ等が接続できるルアーロック形状であり、さらにハブにはフィルタが内蔵されている。そのため市販のシリンジ等と接続し、薬液を移す際に異物を除去することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、薬液を容器から他の薬液容器に移す際に市販のシリンジ等に接続し、薬液中の異物を除去するために使用する。

【使用方法等】

- 薬液を吸引する場合
 - ① 汚染に十分注意した上で包装内から取りだし、メスルアーロックハブを、シリンジ等にしっかりと接続します。
 - ② 汚染に十分注意した上でオスルアーロックハブを注射針等のメスルアーロックハブに接続します。
 - ③ 注射針を薬液の入った容器から薬液を吸引して下さい。
- 薬液を注入する場合
 - ① 汚染に十分注意した上で包装内から取りだし、メスルアーロックハブを、薬液が充填されたシリンジ等にしっかりと接続します。
 - ② 汚染に十分注意した上でオスルアーロックハブを注射針等のメスルアーロックハブに接続します。
 - ③ 誤刺に注意し、注射針を穿刺部位に穿刺し、薬液を注入して下さい。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品を薬液吸引目的で使用した場合、薬液注入目的で使用しないこと。また、本品を薬液注入目的でしようした場合、薬液吸引目的で使用しないこと。
2. 本品は通過させる薬液を一方に固定し、絶対に通過させる薬液を往復させないこと。

3. 使用中は本品の破損、接続部のゆるみ及び薬液漏れ等について、絶えず監視すること。
4. ロックコネクターとポリ塩化ビニル製のメスコネクターを接続する場合は注意すること。[外れなくなる可能性がある]

*** 【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- * 本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

<重大な不具合>

- 製品の変形、破損、ひび割れ等
- 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて常温にて保管すること。

2. 有効期間

- 使用期限は外箱を参照のこと。[自己認証（自社データ）による。]

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メルズンゲン ドイツ

B.Braun Melsungen Germany