

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000
マルチアド分注システム
(MAC1001)

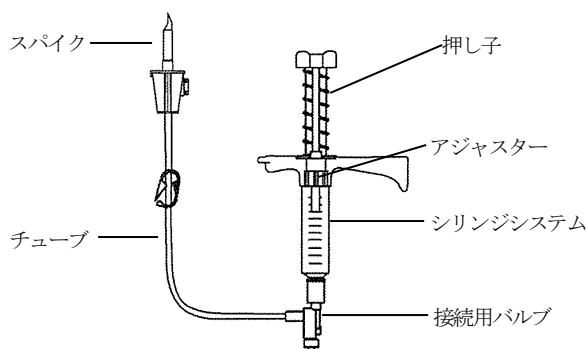
再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表例）>

**<材質>**

- ・ チューブ：ポリ塩化ビニル

【使用目的又は効果】

薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意した上で滅菌包装内から取り出す。
2. シリンジシステムの先端のキャップをとり、接続用バルブとしっかりと接続をする。
3. チューブの先のスパイクを薬液ボトルにしっかりと差し込む。
4. シリンジシステムを垂直にしながら、押し子を操作しエアを抜く。
5. 押し子の横のアジャスターを操作し、吸引量の設定をする。
6. 接続用バルブへ金属針等を接続し、移動する側の薬剤容器へ接続する。
7. 押し子を操作し、薬液を移動する。

【使用上の注意】

<不具合・有害事象>

以下の不具合が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- ・ 製品の変形、破損、ひび割れ等
- ・ スパイクの折れや曲げ
- ・ 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・ 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 使用期間

使用期限は外箱に記載。〔自己認証による。〕

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカル社 アメリカ

B.Braun Medical Inc. USA